OMRON

Automatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät

M400 Intelli IT (HEM-7155T-D) Gebrauchsanweisung

> IM-HEM-7155T-D-02-01/2020 2870438-5B Ausgabedatum: 2020-05-03

All for Healthcare

Einführung

- Wichtige Sicherheitsinformationer Übersicht über das Messgerät
- Vorbereitung
- Verwendung des Messgerätes ohne Smartphone oder Tablet Verwendung des Messgerätes mit einem Smartphone oder Tablet
- Verwendung der Speicherfunktion Weitere Einstellunger
- Fehlermeldungen, Fehlersuche und -behebung
- 8. Wartung Optionales medizinisches Zubehö
- 10. Technische Daten
- 11. Zeichenerklärung und Herstellererklärung

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das automatische Oberarm-Blutdruckmessgerät OMRON M400 Intelli IT entschieden haben. Dieses Blutdruckmessgerät verwendet zur Blutdruckmessung die oszillometrische

Methode. Das bedeutet, dass dieses Messgerät die Bewegung Ihres Blutes durch Ihre Oberarmarterie erkennt und diese Bewegungen in einen digitalen Messwert umwandelt.

Sicherheitshinweise Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zum

automatischen Oberarm-Blutdruckmessgerät OMRON M400 Intelli IT. Um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung dieses Messgerätes sicherzustellen, müssen Sie alle Anweisungen I ESEN und VERSTEHEN. Wenn Sie die Anweisungen nicht verstehen oder Fragen dazu haben. wenden Sie sich an Ihren OMRONEinzelhändler oder Vertreter, bevor Sie das Messgerät verwenden. Für ausführliche Informationen zu Ihrem Blutdruck wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Das Gerät ist ein digitales Messgerät zur Messung von Blutdruck und

Pulsfreguenz bei erwachsenen Patienten. Das Messgerät erkennt das Auftreten unregelmäßiger Herzschläge während der Messung und gibt zusammen mit den Messwerten ein Warnsignal aus. Es ist hauptsächlich auf allgemeinen Haushaltsgebrauch ausgelegt.

Prüfung des Packungsinhaltes

Nehmen Sie das Messgerät und die zugehörigen Komponenten aus der Verpackung und überprüfen Sie alles auf Unversehrtheit. Ist das Messgerät oder eine Komponente beschädigt, darf das Messgerät NICHT VERWENDET werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren OMRON-Einzelhändler oder Vertreter.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Strangulationsgefahr besteht.

Datenübertragung

Lesen Sie die Wichtigen Sicherheitsinformationen in dieser Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Messgerät verwenden. Halten Sie sich aus Sicherheitsgründen genau an diese

Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Für ausführliche Informationen zu Ihrem Blutdruck WENDEN SIE SICH AN IHREN ARZT.

Zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu sehr

schweren Verletzungen führen kann. •Das Messgerät NICHT bei Babys, Kleinkindern, Kindern oder Personen verwenden die ihren Willen nicht ausdrücken können Passen Sie die Medikation NICHT aufgrund der Messergebnisse

dieses Blutdruckmessgerätes an. Nehmen Sie die Medikamente wie

von Ihrem Arzt verschrieben. NUR ein Arzt ist qualifiziert, um Bluthochdruck zu diagnostizieren und zu behandeli Dieses Messgerät NICHT an einem verletzten Arm oder an einem Arm anwenden, der medizinisch behandelt wird.

Die Manschette NICHT während einer Infusion oder Bluttransfusion

• Dieses Messgerät NICHT in Bereichen mit Hochfrequenz-Chirurgiegeräten, MRT-Geräten oder CT-Scannern verwenden. Wird dieser Abstand nicht eingehalten, kann dies zu einer Fehlfunktion des Messgerätes führen und/oder eine ungenaue Messung

verursachen. • Dieses Messgerät NICHT in sauerstoffangereicherten Umgebungen oder in der Nähe brennbarer Gase verwenden

•Wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Messgerät in folgenden Fällen verwenden: häufig auftretende Arrhythmien wie zum Beispiel atriale oder ventrikuläre Extrasystolen oder Vorhofflimmern, Arteriosklerose, schlechte Durchblutung

•Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei Verschlucken eine

Erstickungsgefahr für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder darstellen

•Dieses Produkt strahlt Hochfrequenzen (HF) im 2,4-GHz-Band ab.

von HF-Geräten eingeschränkt sind, etwa in Flugzeugen oder in

Krankenhäusern, wird nicht empfohlen. An Orten, an denen die

Nutzung von HF-Geräten eingeschränkt ist, sollte die Bluetooth®-

und/oder das Netzteil aus der Steckdose gezogen werden.

Funktion des Messgerätes ausgeschaltet, die Batterien entnommen

Die Verwendung dieses Produktes an Orten, an denen die Nutzung

Diabetes, Schwangerschaft, Präeklampsie, Nierenerkrankungen BEACHTEN Sie, dass diese Erkrankungen sowie Bewegung, Zittern oder Schlottern des Patienten den Messwert beeinträchtigen

•Die Messwerte sollten NIE zur Eigendiagnose oder Druck höher ist als 210 mmHg" in Abschnitt 3 dieser Selbstbehandlung herangezogen werden. Wenden Sie sich IMMER an Ihren Arzt. ·Lesen und befolgen Sie vor der Entsorgung des Gerätes, von •Der Luftschlauch und das Netzteilkabel sollten außer Reichweite Zubehör oder optionalen Teilen die Hinweise unter "Korrekte von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern aufbewahrt werden, da

Entsorgung dieses Produktes" in Abschnitt 11. Datenübertragung • Tauschen Sie die Batterien NICHT aus und trennen Sie das Netzteil NICHT, während Ihre Messwerte an Ihr Smartphone oder Tablet übertragen werden. Dies kann zu Fehlfunktionen dieses

Messgerätes und zu Fehlern bei der Übertragung Ihrer Blutdruckwerte führen. Handhabung und Verwendung des Netzteils (optionales Zubehör)

Stecken Sie das Netzteil vollständig in die Steckdose.

Handhabung und Verwendung des Netzteils (optionales Zubehör) Verwenden Sie das Netzteil NICHT, wenn das Messgerät oder das

Netzteilkabel beschädigt ist. Ist das Messgerät oder das Kabel beschädigt, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose

Zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die

wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder

•Schließen Sie das Netzteil an einer geeigneten Steckdose an. Schließen Sie das Gerät NICHT an einer Mehrfachsteckdose an.

•Das Netzteil NICHT zerlegen oder versuchen, es selbst zu

stecken oder ziehen es heraus.

von Blutergüssen führen kann.

angelegt wurde.

Luftablass erfolgt.

Messung verursachen.

Messwerte hervorrufen.

Arztpraxen.

verursachen

Abschnitt 10.

unzugänglich auf.

Batterie-Handhabung und -verwendung

Stecken Sie das Netzteil NIE mit nassen Händen in die Steckdose

•Bewahren Sie die Batterien für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder

Achtung mittelschweren Verletzungen des Benutzers oder des Patienten oder Geräteschäden beziehungsweise Schäden

Verwenden Sie dieses Messgerät nicht mehr und wenden Sie sich

an Ihren Arzt, wenn Hautirritationen oder Beschwerden auftreten

Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Messgerät an einem Arm

mit intravasalem Zugang bzw. intravaskulärer Therapie oder AV-

Shunt (arteriovenöser Shunt) verwenden, da die vorübergehende

Beeinträchtigung des Blutflusses zu Verletzungen führen kann.

• Wenn bei Ihnen eine Brustamputation durchgeführt wurde, fragen

Blutkrankheiten sollten vor Verwendung des Messgerätes ihren

•Führen Sie die Messungen NICHT häufiger als notwendig durch,

Pumpen Sie die Manschette NUR auf, wenn sie am Oberarm

weil sich durch die Beeinträchtigung des Blutflusses Blutergüsse

• Nehmen Sie die Manschette ab, wenn während der Messung kein

Dieses Messgerät NUR zum Messen des Blutdrucks verwenden.

Stellen Sie während der Messung sicher, dass sich kein Mobilgerät

oder anderes elektrisches Gerät, das elektromagnetische Felder

befindet. Wird dieser Abstand nicht eingehalten, kann dies zu einer

erzeugt, in einem Abstand von 30 cm um dieses Messgerät

Fehlfunktion des Messgerätes führen und/oder eine ungenaue

Das Messgerät und andere Komponenten NICHT zerlegen oder

• NICHT an einem feuchten Ort verwenden oder an Orten, an denen

gelangen. Anderenfalls kann das Messgerät beschädigt werden.

Dieses Messgerät NICHT in einem sich bewegenden Fahrzeug

versuchen, diese selbst zu reparieren. Dies könnte falsche

das Risiko besteht, dass Wasserspritzer auf das Messgerät

Dieses Messgerät NICHT an Orten mit hoher oder niedriger

Luftfeuchtigkeit bzw. hohen oder niedrigen Temperaturen

Beobachten Sie während der Messung Ihren Arm, um zu

häufiger Nutzung, wie etwa medizinischen Kliniken oder

Koffeingenuss, Rauchen, Sport und Essen zu meiden.

bevor Sie die Messung durchführen.

Verletzungen zur Folge haben.

falschen Messergebnissen führen.

Manschette angegebenen Oberarmumfang

vermeiden, dass die Blutzirkulation unnötig lange unterbunden

Verwenden Sie dieses Messgerät NICHT in Umgebungen mit

Verwenden Sie das Messgerät NICHT gleichzeitig mit anderen

einer Fehlfunktion führen und/oder eine ungenaue Messung

• Ruhen Sie sich vor der Messung mindestens 5 Minuten aus.

Entfernen Sie enge oder dicke Kleidungsstücke von Ihrem Arm,

• Halten Sie während der Messung still und sprechen Sie NICHT.

Messungen, die nach einem größeren Temperaturwechsel

das Messgerät etwa 2 Stunden lang auf die in den

bringen, wenn es zuvor bei maximaler oder minimaler

NICHT mehr. Details dazu finden Sie im Abschnitt 10.

Verwenden Sie die Manschette nur bei Personen mit dem für die

Bringen Sie das Messgerät vor der Messung auf Raumtemperatur.

vorgenommen werden, können ungenau sein. OMRON empfiehlt,

Aufbewahrungstemperatur gelagert wurde. Weitere Informationen

Betriebsbedingungen angegebene Umgebungstemperatur zu

zur Betriebs- und Lager-/Transporttemperatur finden Sie im

Verwenden Sie das Messgerät nach Ablauf der Nutzungsdauer

•Die Manschette und den Luftschlauch NICHT übermäßig knicken.

oder knicken. Dies kann durch Unterbrechung des Blutflusses

• Fassen Sie am Stecker und nicht am Schlauch an, wenn Sie den

Kunststoff-Luftschlauchstecker aus dem Schlauchende ziehen.

Zubehörteile, die speziell für dieses Gerät bestimmt sind. Die

Verwendung nicht zugelassener Netzteile, Manschetten und

Verwenden Sie NUR die für dieses Messgerät zugelassene

Manschette. Die Verwendung anderer Manschetten kann zu

im Zusammenhang mit dem Messgerät führen.

Verwenden Sie NUR Netzteile, Manschetten, Batterien und andere

Batterien kann das Messgerät beschädigen und/oder zu Gefahren

Aufpumpen auf einen höheren Druck als notwendig kann am Arm,

Weitere Informationen finden Sie unter "Wenn Ihr systolischer

wo die Manschette angelegt ist, zu Blutergüssen führen. HINWEIS:

Den Luftschlauch während der Messung NICHT zusammendrücken

medizinischen elektrischen Geräten (ME-Geräten). Dies könnte zu

Mindestens 30 Minuten vor der Messung sind Baden, Alkohol- und

verwenden. Details dazu finden Sie im Abschnitt 10.

verwenden, etwa in einem Auto oder Flugzeug.

Erschütterungen oder Vibrationen aussetzen.

Dieses Messgerät NICHT fallen lassen oder starken.

Arzt konsultieren, da das Aufpumpen der Manschette zur Bildung

Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Messgerät verwenden.

Personen mit ernsthaften Durchblutungsstörungen oder

an anderen Gegenständen führen kann.

 Ziehen Sie beim Trennen des Netzteils von der Steckdose aus Sicherheitsgründen am Stecker. Ziehen Sie NICHT am Kabel des

> Korrekter Umgang mit dem Netzteilkabel: NICHT beschädiger NICHT unterbrechen

> NICHT manipulieren. NICHT gewaltsam biegen oder ziehen. NICHT verdrehen.

NICHT verwenden, wenn es zu einem Knäuel aufgewickelt ist. NICHT einklemmen.

NICHT unter schwere Gegenstände legen

Befreien Sie das Netzteil von Staub.

Trennen Sie das Netzteil, wenn das Gerät nicht verwendet wird. • Trennen Sie das Netzteil vor der Reinigung des Messgerätes. Batterie-Handhabung und -verwendung •Die Batterien NICHT in verkehrter Richtung (Pole auf den falschen

Seiten) einsetzen Verwenden Sie für dieses Messgerät ausschließlich 4 Alkali- oder Manganbatterien vom Typ AA. KEINE anderen Batterietypen

verwenden. KEINE neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwenden. KEINE unterschiedlichen Batteriemarken zusammen verwender • Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Messgerät über einen

längeren Zeitraum nicht benutzt wird. •Wenn Batteriesäure in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese sofort

mit reichlich klarem Wasser aus. Wenden Sie sich sofort an Ihren •Wenn Batteriesäure auf Ihre Haut oder Ihre Kleidung gelangt, spülen Sie diese sofort mit reichlich klarem, lauwarmem Wasser ab

Wenn weiterhin Hautreizung, Verletzung oder Schmerzen bestehen,


wenden Sie sich an Ihren Arzt. Verwenden Sie Batterien NICHT nach dem Ablaufdatum. Prüfen Sie die Batterien regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie sich in einem guten Betriebszustand befinden.

1. Übersicht über das Messgerät

1.1 Lieferumfang des Produktes Messgerät, Armmanschette (HEM-FL31), 4 Batterien vom Tvp AA. Aufbewahrungstasche, Gebrauchsanweisung, Installationssanleitung, Garantiekarte, Blutdruckpass

1.2 Messgerät und Armmanschette

Vorderseite des Messgerätes

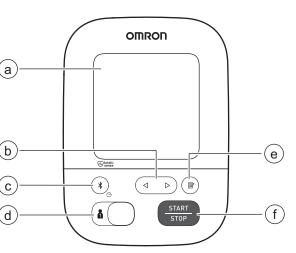

(a) Display

Vor-/Zurück-Tasten


Verbindungstaste (Datum/Uhrzeit)

(d) Auswahlschalter für die Benutzer-ID

(f) START/STOP-Taste

Speichertaste

Linke Seite, Rückseite und Unterseite des Messgerätes

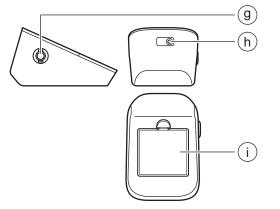

(g) Luftschlauchbuchse

h Netzteilanschluss (für optionales Netzteil)


(i) Batteriefach

Manschette (Oberarmumfang: 22 – 42 cm)

(j) Luftschlauchstecker (k) Luftschlauch



1.3 Display und Symbole

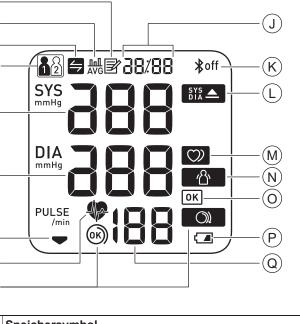

Speichersymbo Erscheint, wenn die im Speicher hinterlegten Messwerte angezeigt werden. Mittelwertsymbol

Blinkt, wenn der Mittelwert der letzten 2 oder 3 Messwerte angezeigt wird, die in den letzten 10 Minuten erfasst

Synchronisationssymbo Blinkt/wird angezeigt, wenn Ihre Daten übertragen werden ssen, da der Speicher voll oder fast voll ist. Wenn Sie Ihr essgerät mit einem Smartphone oder Tablet gekoppelt haben, übertragen Sie Ihre Messwerte sofort, bevor das Messgerät die ältesten Messwerte löscht. Im internen Messgerätespeicher können pro Benutzer 60 Messwerte gespeichert werden.

Wenn der Auswahlschalter für die Benutzer-ID aktiviert wurde, wird die Benutzer-ID angezeigt. Wert des systolischen Blutdrucks

Benutzer-ID-Symbol

Wert des diastolischen Blutdrucks

Symbol Luftablass Wird beim Luftablass aus der Manschette angezeigt. Herzschlagsymbol

Blinkt während der Messung. Symbol Manschettensitzkontrolle (OK) Nird angezeigt, wenn die Manschette bei der Messung richtig um den Arm gelegt wurde. Symbol erscheint auch, wenn ältere Messwerte aufgerufen werden.

Symbol Manschettensitzkontrolle (locker) ird angezeigt, wenn die Manschette bei der Messung nicht richtig um den Arm gelegt wurde. Symbol erscheint auch, wenn ältere Messwerte aufgerufen werden.

Anzeige Datum/Uhrzeit

Symbol Bluetooth EIN Wird angezeigt, wenn Ihre Messwerte übertragen werden.

Symbol Bluetooth AUS ₩ird angezeigt, wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist.

Symbol für Bluthochdruck Nird angezeigt, wenn Ihr systolischer Blutdruck 135 mmHg oder höher und/oder Ihr diastolischer Blutdruck 85 mmHg oder höher beträgt

3. Drücken Sie die Taste (*), um das Jahr zu bestätigen. Anschließend blinkt der Symbol Unregelmäßiger Herzschlag Monat. Wiederholen Sie Wird angezeigt, wenn mindestens 2-mal während einer diese Schritte, um Monat. Messung ein unregelmäßiger Herzschlag festgestellt wird. Tag, Stunde und Minuten

Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus beträgt, der während der Blutdruckmessung erkannt wird. Unregelmäßiger Herzschlag

Ein unregelmäßiger Herzschlag ist definiert als ein

Das Symbol für den unregelmäßigen Herzschlag kann auch registriert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7 Wird das Symbol weiterhin angezeigt, sollten Sie sich an einen Arzt wenden und dessen Anweisungen

Symbol Bewegungsfehler Wird neben dem Messwert angezeigt, wenn Sie sich während der Messung bewegen. Nehmen Sie in diesem Fall die Manschette ab und warten Sie 2 bis 3 Minuten. Legen Sie dann die Manschette wieder an, verhalten Sie sich ruhig und nehmen Sie eine neue Messung vor.

Blinkt, wenn Ihr Messgerät mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden ist oder wenn Messwerte erfolgreich übertragen wurden.

Symbol für niedrigen Batterieladestand Blinkt, wenn der Batterieladestand niedrig ist. Symbol für leere Batterien Wird angezeigt, wenn die Batterien leer sind.

Puls-Display/Speichernummer Die Pulsfrequenz wird nach der Messung angezeigt.

) Durch Drücken auf die Taste 🕑 wird die Speichernummer ca. 1,5 Sekunden lang angezeigt, bevor auf dem Display wieder die •Ruhen Sie sich vor der Messung mindestens 5 Minuten aus. Pulsfrequenz angezeigt wird.

2018 ESH/ESC* Richtlinien für die Verwaltung arterieller Hypertonie 2.4 Anlegen der Manschette Definitionen von Hypertonie bei Blutdruckmessungen in der Arztpraxis und

zu Hause

≥ 135 mmHg

≥ 85 mmHg

In der Arztpraxis

≥ 140 mmHg

≥ 90 mmHg

Diese Bereiche wurden aus statistischen Blutdruckwerten ermittelt.

* European Society of Hypertension (ESH) and European Society of

herangezogen werden. Wenden Sie sich IMMER an Ihren Arzt.

Die Messwerte sollten NIE zur Eigendiagnose oder Selbstbehandlung

Systolischer Blutdruck

Diastolischer Blutdruck

Cardiology (ESC).

2. Vorbereitung

nach unten.

2.1 Einsetzen der Batterien

das Jahr im Display

als neue Batterien

Uhrzeit korrekt ein

des Messgerätes

anzuzeigen.

durchzuführen.

durchzuführen.

einzusteller

beschrieben ein.

stressreichen Zeiten.

der Messung das Symbol -:--.

2.3 Tipps zur Blutdruckmessung

Blutdruckpasses herunterladen.

Sie im Unterabschnitt 4.1

1. Drücken Sie den Haken der

Batterieabdeckung herunter

2. Legen Sie 4 AA-Batterien wie

und ziehen Sie die Abdeckung

gezeigt in das Batteriefach ein.

finden Sie im Unterabschnitt 4.1.

2.2 Einstellen von Datum und Uhrzeit

3. Schließen Sie die Batterieabdeckung wieder.

und Uhrzeit finden Sie im Unterabschnitt 2.2.

Wenn die Batterien korrekt eingelegt wurden, blinkt

Informationen zum manuellen Einstellen von Datum

Informationen zum Koppeln des Messgerätes zur

•Wenn das Symbol im Display blinkt, sollten Sie die Batterien ersetzen.

Beim Ersetzen der Batterien werden die letzten Messwerte nicht gelöscht.

• Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den geltenden Bestimmungen.

Stellen Sie vor der ersten Verwendung des Messgerätes Datum und

1. Wird nichts angezeigt, drücken Sie die Taste (*), um das Jahr

Wird das Jahr bereits angezeigt, überspringen Sie diesen Schritt.

2. Drücken Sie die Taste → oder ⊲ , um das Jahr zu ändern.

Halten Sie die Taste ▷ gedrückt, um einen schnellen Vorlauf

Halten Sie die Taste (gedrückt, um einen schnellen Rücklauf

4. Drücken Sie die Taste (*), um die Einstellung zu speichern.

•Wenn Sie Datum und Uhrzeit zurücksetzen müssen, entnehmen Sie

kurz die Batterien und setzen Sie sie wieder ein oder drücken Sie die

Taste (*) und stellen Sie Datum und Uhrzeit wie in den obigen Schritten

Wenn Datum und Uhrzeit nicht eingestellt sind, blinkt während oder nach

Befolgen Sie diese Anweisungen, um genaue Messwerte sicherzustellen:

Es ist wichtig, die Messungen immer zur gleichen Tageszeit vorzunehmen.

aufzuzeichnen. Eine Einzelmessung gibt kein genaues Bild Ihres wahren

Es wird empfohlen, morgens und abends Messungen durchzuführen.

• Denken Sie daran, Ihre Blutdruck- und Pulsmesswerte für Ihren Arzt

Blutdrucks. Im mitgelieferten Blutdruckpass können Sie mehrere

www.omron-healthcare.com können Sie auch PDF-Dateien des

Mindestens 30 Minuten vor der Messung sind Baden, Alkohol- und

Messwerte über einen bestimmten Zeitraum erfassen. Unter

Koffeingenuss, Rauchen, Sport und Essen zu meiden.

• Durch Stress steigt der Blutdruck. Vermeiden Sie Messungen zu

• Die Messungen sollten an einem ruhigen Ort durchgeführt werden.

3 Sekunden nach Einstellung der Minuten schaltet sich Ihr Messgerät

•Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine kürzere Lebensdauer

Schalten Sie zunächst das Messgerät aus und entnehmen Sie alle

Batterien, Setzen Sie dann 4 neue Batterien gleichzeitig ein

automatischen Einstellung von Datum und Uhrzeit

▲ Warnhinweis

Oberarm beschrieben. Wenn Sie die Messung an Ihrem rechten Arm durchführen möchten, befolgen Sie die Schritte unter "So nehmen Sie eine Messung am rechten Arm vor" am Ende dieses Unterabschnitts. • Der Blutdruck kann sich zwischen dem rechten und linken Arm unterscheiden, und die gemessenen Blutdruckwerte können unterschiedlich sein. OMRON empfiehlt daher, immer denselben Arm für Messungen zu verwenden. Falls sich die Messwerte an beiden Armen deutlich unterscheiden, sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen, welchen Arm Sie für die Messung verwenden.

• In den folgenden Schritten wird das Anlegen der Manschette am linken

. ∴ Achtung Entfernen Sie enge oder dicke Kleidungsstücke von Ihrem Arm, bevor

Sie die Messung durchführen.

Verbinden Sie die Manschette mit dem Messgerät, in dem Sie den Klick) Luftschlauchstecker fest in die Luftschlauchbuchse einstecken, bis er mit einem Klick einrastet.

1 bis 2 cm

Legen Sie die Manschette an Ihren linken Oberarm an.

Hinweis Der untere Rand der Manschette muss 1 bis 2 cm oberhalb des Ellbogens liegen. Der Luftschlauch muss sich an der Innenseite Ihres Armes befinden und in Richtung Ihres Mittelfingers verlaufen.

Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch an der Arminnenseite positioniert ist, und befestigen Sie die Manschette sicher, so dass sie nicht verrutscht.

So nehmen Sie eine Messung am rechten Arm vor

Wenn Sie die Messung am rechten Arm durchführen, sollte der Luftschlauch seitlich am Ellbogen an der Armunterseite entlang geführt werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Arm nicht auf dem Luftschlauch liegt.




2.5 Korrekte Körperhaltung Zur Messung müssen Sie bei

• Wenn das Messgerät mit der App OMRON connect verknüpft ist, werden angenehmer Raumtemperatur Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt. Weitere Informationen finden entspannt und beguem sitzen. Legen Sie Ihren Arm auf dem •Wenn die Batterien korrekt eingelegt wurden, blinkt das Jahr im Display

> Setzen Sie sich in einen bequemen Sessel oder auf einen beguemen Stuhl, bei dem Rücken und Arme aestützt werden. Stellen Sie die Füße flach auf den Boden und kreuzen Sie Ihre Beine nicht. Die Manschette sollte auf Herzhöhe am Arm angelegt


werden, während der Arm bequem auf einem Tisch ruht.

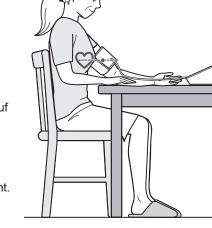

2.6 Auswahl einer Benutzer-ID

Ihr Messgerät kann für 2 Personen Messungen durchführen und die Messwerte speichern. Zu diesem Zweck wird der Auswahlschalter für die Benutzer-ID verwendet.

Wählen Sie Ihre Benutzer-ID (1 oder 2).

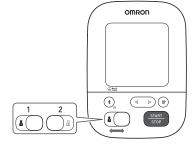

3. Verwendung des Messgerätes ohne Smartphone oder

3.1 Eine Messung vornehmen

Sie können Ihr Messgerät ohne Kopplung mit einem Smartphone oder Tablet verwenden. Informationen zum Koppeln Ihres Messgerätes mit einem Smartphone oder Tablet finden Sie im Unterabschnitt 4.1.

• Drücken Sie zum Abbrechen der Messung einmal die [START/STOP]-Taste, um die Luft aus der Manschette abzulassen.

Verwenden Sie das Messgerät NICHT gleichzeitig mit anderen medizinischen elektrischen Geräten (ME-Geräten). Dies könnte zu einer Fehlfunktion führen und/oder eine ungenaue Messung verursachen. Halten Sie während der Messung still und sprechen Sie nicht.

1. Drücken Sie die [START/STOP]-Taste. Vor dem Start der Messung werden alle Symbole auf dem Display angezeiat. 2. Sitzen Sie ruhig und sprechen Sie nicht, bis die Messung


vollständig abgeschlossen ist. Das Symbol blinkt bei jedem Herzschlag.

• Das Symbol (w) wird angezeigt, wenn die Manschette richtig um den Arm aeleat wurde.

•Wird das Symbol angezeigt, wurde die Manschette nicht richtig angelegt. Drücken Sie die Taste [START/STOP], um Ihr Messgerät auszuschalten, und bringen Sie dann die Manschette richtig an.

hat, wird automatisch die Luft aus der Manschette abgelassen. Ihr Blutdruck und Ihre Pulsfrequenz werden angezeigt. Wenn entweder der systolische oder der diastolische Messwert zu

Nachdem das Messgerät den Blutdruck und die Pulsfrequenz erfasst

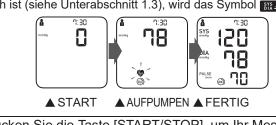

3. Drücken Sie die Taste [START/STOP], um Ihr Messgerät auszuschalten.

• Nach 2 Minuten schaltet sich Ihr Messgerät automatisch aus. •Warten Sie zwischen zwei Messungen 2 – 3 Minuten. In dieser Zeit können die Arterien sich wieder vollständig öffnen und in den Normalzustand zurückkehren. Abhängig von Ihrer physiologischen Konstitution ist eventuell eine längere Wartezeit erforderlich.

■ Anwendung des Gastmodus

Ihr Messgerät speichert Messwerte für 2 Benutzer. Soll eine einzelne Messung bei einem anderen Benutzer durchgeführt werden, kann dafür der Gast-Modus aktiviert werden.

• Diese Werte werden nicht im Speicher abgelegt. 1. Halten Sie die Taste [START/STOP] für

mindestens 2 Sekunden gedrückt. Das Benutzer-ID-Symbol sowie Datum und Uhrzeit werden ausgeblendet.



2. Lassen Sie die Taste [START/STOP] los, sobald die Benutzer-ID und Datum/Uhrzeit ausgeblendet werden.

Die Manschette wird automatisch aufgepumpt.

■ Wenn Ihr systolischer Druck höher ist als 210 mmHg Wenn Ihr systolischer Druck höher ist als 210 mmHg, führen Sie eine manuelle Messung durch.

Drücken Sie während des Aufpumpens der Manschette die Taste

[START/STOP] und halten Sie sie gedrückt, bis ein Druck von 30 bis 40 mmHg über Ihrem erwarteten systolischen Druck erreicht ist.

•Die Manschette darf nicht auf über 299 mmHg aufgepumpt werden.

Aufpumpen auf einen höheren Druck als notwendig kann am Arm, wo die Manschette angelegt ist zu Blutergüssen führen.

4. Verwendung des Messgerätes mit einem Smartphone

4.1 Koppeln Ihres Messgerätes mit einem Smartphone oder Tablet Datum und Uhrzeit Ihres Messgerätes werden beim Koppeln mit Ihrem

Smartphone oder Tablet automatisch eingestellt. Jnter www.omronconnect.com/devices/ finden Sie eine Liste kompatible

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

2. Laden Sie die kostenlose App OMRON connect herunter und

installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Wenn Sie die App OMRON connect bereits heruntergeladen und ein

Konto erstellt haben, öffnen Sie die App und fügen Sie Ihr neues Messaerät hinzu 3. Öffnen Sie die App und befolgen Sie die auf dem Smartphone oder Tablet angezeigten Anweisungen.

4. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung mit Ihrem Messgerät erfolgreich hergestellt wurde.

Wurde das Messgerät erfolgreich mit Ihrem

das OK-Symbol angezeigt.

nartphones und Tablets.

00 Smartphone oder Tablet verbunden, wird

5. Drücken Sie die Taste [START/STOP], um Ihr Messgerät auszuschalten.

 Wird das Symbol Err angezeigt, befolgen Sie die Anweisungen in der App OMRON connect.

• Nach 2 Minuten schaltet sich Ihr Messgerät automatisch aus. Beachten Sie, dass OMRON nicht für den Verlust von Daten und/oder Informationen in der App haftet. • OMRON connect ist die einzige App, die wir zur korrekten

Datenübertragung von Ihrem Messgerät empfehlen.

4.2 Eine Messung vornehmen

Informationen zum Durchführen von Messungen finden Sie im Unterabschnitt 3.1. Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und befolgen Sie die Anweisungen.

•Wenn Sie ein Profil angelegt haben, wird beim Drücken der Taste [START/STOP] Ihr Geburtstag angezeigt und das Benutzer-ID-Symbol blinkt zweimal

•Ihr Profil können Sie über die App OMRON connect anlegen. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt 4.1. • Ihr Messgerät darf nicht mehr als 5 m von Ihrem Smartphone oder Tablet

entfernt sein. ■ Automatische/manuelle Datenübertragung •Bei aktivierter Bluetooth-Funktion werden die Messwerte innerhalb

1 Stunde nach Abschluss der Messung an Ihr Smartphone oder Tablet übertragen

•Um die Messwerte manuell zu übertragen, drücken Sie die Taste 🚯 4.3 Deaktivieren/Aktivieren der Bluetooth-Funktion Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Messgerät in den

folgenden Bereichen, in denen die Nutzung von drahtlosen Geräten

• Im Flugzeug • In Krankenhäusern • Im Ausland

Die Bluetooth-Funktion ist standardmäßig aktiviert. 1. Wenn Ihr Messgerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste (*) mindestens 10 Sekunden gedrückt. Es blinkt 3-mal "oFF".

2. Drücken Sie die Taste [START/STOP], um Ihr Messgerät

Hinweis

auszuschalten.

• Um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren, halten Sie die Taste (* mindestens 2 Sekunden gedrückt. Im Display wird "on" angezeigt. Anschließend schaltet sich Ihr Messgerät nach 2 Minuten automatisch aus.

angezeigt.



5. Verwendung der Speicherfunktion

Ihr Messgerät speichert automatisch maximal 60 Messwerte pro Benutzer.

• Dieses Messgerät kann von mehreren Benutzern verwendet werden. Informationen zum Benutzerwechsel finden Sie im Unterabschnitt 2.6. Achten Sie darauf, dass Ihre Messwerte immer unter der richtigen Benutzer-ID gespeichert werden.

5.1 Anzeige der gespeicherten Messwerte

- 1. Wählen Sie Ihre Benutzer-ID.
- 2. Drücken Sie die Taste 🖹.



1,5 Sekunden lang eingeblendet. Der letzte gespeicherte Messwert wird mit 1 nummeriert.

• Ist der Messwert zu hoch (siehe Unterabschnitt 1.3), wird das Symbol ∰≜ angezeigt. • Falls im Speicher keine Messwerte gespeichert sind, wird die rechts abgebildete Anzeige angezeigt. Ist der Speicher voll, werden die alten Messwerte durch neue überschrieben. Dabei werden die ältesten Messwerte zuerst gelöscht.

3. Drücken Sie mehrmals auf die Taste (d oder →), um durch die gespeicherten Messwerte zu blättern.

Zur Anzeige der neueren Messwerte

5.2 Anzeige des Mittelwertes Ihr Messgerät kann den Mittelwert aus den letzten 2 oder 3 Messwerten berechnen, die in den letzten 10 Minuten erfasst wurden.

• Stellen Sie vor der Durchführung von Messungen und der Anzeige des Mittelwertes Datum und Uhrzeit am Messgerät korrekt ein.

- 1. Wählen Sie Ihre Benutzer-ID.
- 2. Wenn Ihr Messgerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste 🕝 mindestens 2 Sekunden gedrückt. Das Symbol ₩ blinkt.
- Falls für diesen Zeitraum nur 2 Messwerte im Speicher sind, wird der Mittelwert anhand dieser


2 Messwerte berechnet.

• Ist der Mittelwert zu hoch (siehe Unterabschnitt 1.3), wird das Symbol ℻▲ angezeigt.

6. Weitere Einstellungen

6.1 Löschen aller gespeicherten Messwerte **1.** Wählen Sie Ihre Benutzer-ID.

- 2. Drücken Sie die Taste 🖹.
- Zuerst wird eine Speichernummer und danach der letzte Messwert
- 3. Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Taste [START/STOP]. Die rechts abgebildete Anzeige

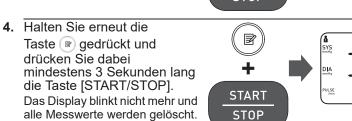




•Alle Messwerte werden gelöscht. Sie können die gespeicherten

Messwerte nicht einzeln löschen.

• Ihr Messgerät schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus.

1. Halten Sie die Taste 🚯 gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Taste [START/STOP]. Die rechts abgebildete Anzeige blinkt.

ausgeschaltet ist

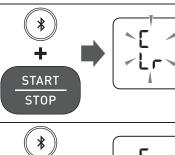

Halten Sie erneut die Taste (*) gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Taste [START/STOP]. Das Display blinkt nicht mehr und Ihr Messgerät wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.



3. Drücken Sie die Taste [START/STOP], um Ihr Messgerät auszuschalten.

6.2 Ihr Messgerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen

folgende Anweisungen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Messgerät

Zum Löschen aller auf Ihrem Messgerät gespeicherten Daten befolgen Sie

 Anschließend blinkt das Jahr im Display. Informationen zum manuellen Einstellen von Datum und Uhrzeit finden Sie im Unterabschnitt 2.2. Informationen zum Koppeln des Messgerätes zur automatischen Einstellung von Datum und Uhrzeit finden Sie im Unterabschnitt 4.1. Beim Zurücksetzen des Messgerätes auf die Standardeinstellungen

werden die Daten in der App nicht gelöscht.

7. Fehlermeldungen und Fehlersuche und -behebung Sollte während der Messung eines der folgenden Probleme auftreten,

stellen Sie zunächst sicher, dass sich keine anderen elektrischen Geräte in einem Abstand von weniger als 30 cm zum Messgerät befinden. Ist dies nicht der Fall und das Problem besteht weiterhin, sehen Sie bitte ub der nachgolgenden Tabelle nach.

Display/Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
erscheint oder die Manschette pumpt nicht auf.	Die Taste [START/ STOP] wurde gedrückt, während die Manschette nicht angelegt war.	Drücken Sie die Taste [START/STOP] erneut, um das Messgerät auszuschalten. Stecken Sie den Luftschlauchstecker fest ein und legen Sie die Manschette korrekt an. Drücken Sie anschließend die Taste [START/STOP].
	Der Luftschlauchstecker wurde nicht korrekt in das Messgerät eingesteckt.	Stecken Sie den Luftschlauchstecker fest ein. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt 2.4.
	Die Manschette wurde nicht richtig angelegt.	Legen Sie die Manschette korrekt an und messen Sie erneut. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt 2.4.
	Die Manschette verliert Luft/hat ein Leck.	Die Manschette durch eine neue ersetzen. Wenden Sie sich an Ihren OMRON- Einzelhändler oder Vertreter.
wird angezeigt oder nach Aufpumpen der Manschette kann keine Messung durchgeführt werden.	Sie haben während der Messung gesprochen oder sich bewegt und die Manschette ist nicht ausreichend aufgepumpt.	Halten Sie still und sprechen Sie während der Messung nicht. Wenn "E2" wiederholt angezeigt wird, pumpen Sie die Manschette manuell auf, bis der systolische Druck um 30 bis 40 mmHg über Ihrem letzten Messergebnis liegt. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt 3.1.
	Der systolische Blutdruck liegt über 210 mmHg und es kann keine Messung durchgeführt werden.	Pumpen Sie die Manschette manuell auf, bis der systolische Druck um 30 bis 40 mmHg über Ihrem letzten Messergebnis liegt. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt 3.1.
E∃ erscheint.	Die Manschette wurde über dem maximal zulässigen Druck aufgepumpt.	Die Manschette während der Messung nicht anfassen bzw. den Luftschlauch nicht knicken. Informationen zum manuellen Aufpumpen

Sie haben während der

Messung gesprochen

oder sich bewegt.

beeinträchtigen die

Messleistuna.

der Manschette finden

Sie am Ende des

Unterabschnitts 3.1.

Halten Sie still und

der Messung nicht.

sprechen Sie während

Display/Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
wird angezeigt.		Legen Sie die Manschette korrekt an und messen Sie erneut Weitere Informationen finden Sie im
erscheint. erscheint.	Die Pulsfrequenz wird nicht korrekt erkannt.	Unterabschnitt 2.4. Halten Sie still und setzen Sie sich währen der Messung richtig hin Wird das Symbol
blinkt nicht während einer Messung		weiterhin angezeigt, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.
Er erscheint.	Es ist ein Funktionsfehler des Messgerätes aufgetreten.	Drücken Sie die Taste [START/STOP] erneut. Falls "Er" weiterhin angezeigt wird, wender Sie sich an Ihren OMRON-Einzelhändler oder Vertreter.
E FF erscheint.	Das Messgerät kann nicht mit einem Smartphone oder Tablet verbunden werden oder die Daten können nicht korrekt übertragen werden.	Befolgen Sie die Anweisungen in der Ap OMRON connect. Wen das Err-Symbol nach Befolgen der App- Anweisungen weiterhin angezeigt wird, wender Sie sich an Ihren OMRON-Einzelhändler oder Vertreter.
P blinkt.	Das Messgerät wartet auf die Kopplung mit dem Smartphone oder Tablet.	Informationen zur Kopplung Ihres Messgerätes mit Ihrem Smartphone oder Table finden Sie im Unterabschnitt 4.1. Sie können auch die Taste [START/STOP] drücker um die Kopplung abzubrechen und Ihr Messgerät auszuschalten.
blinkt.	Das Messgerät ist bereit für die Übertragung Ihrer Messwerte auf das Smartphone oder Tablet.	Öffnen Sie die App OMRON connect, um Ihre Messwerte zu übertragen.

8.1 Wartung

werden dabei nicht gelöscht.

. Stecken Sie den Netzteilstecker

2. Schließen Sie das Netzteil an

Zum Trennen des Netzteils sollte

einer Steckdose an.

in den Netzteilanschluss an der

Rückseite des Messgerätes ein.

Netzteilstecker vom Messgerät abgezogen werden.

Damit das Messgerät nicht beschädigt wird, bitte Folgendes beachten:

Veränderungen oder Modifikationen, die vom Hersteller nicht

genehmigt sind, führen zum Erlöschen der Benutzergarantie.

auch wenn Sie das Netzteil verwenden. Wenn nur das Netzteil ohne

Batterien im Messgerät verwendet wird, müssen Sie möglicherweise

jedes Mal Datum und Uhrzeit erneut einstellen, wenn Sie das Netzteil

zuerst der Netzstecker des Netzteils aus der Steckdose und dann der

von der Steckdose trennen und wieder einstecken. Die Messwerte

erscheint. erscheint. blinkt nicht während einer Messung	Die Pulsfrequenz wird nicht korrekt erkannt.	Unterabschnitt 2.4. Halten Sie still und setzen Sie sich während der Messung richtig hin. Wird das Symbol weiterhin angezeigt, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.	 ⚠ Achtung Das Messgerät und andere Komponenten NICHT zerlegen oder versuchen, diese selbst zu reparieren. Dies könnte falsche Messw hervorrufen. 8.2 Lagerung Bewahren Sie Ihr Messgerät und die zugehörigen Komponenten in den Aufbewahrungstasche auf. 	der
erscheint.	Es ist ein Funktionsfehler des Messgerätes aufgetreten.	Drücken Sie die Taste [START/STOP] erneut. Falls "Er" weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Einzelhändler oder Vertreter.	Bewahren Sie das Messgerät und die Komponenten an einem saub und sicheren Ort auf. 1. Trennen Sie die Manschette vom Messgerät. Achtung Fassen Sie am Stecker und nicht am Schlauch an, wenn Sie den Kunststoff-Luftschlauchstecker aus dem Schlauchende ziehen.	eren
E FF erscheint.	Das Messgerät kann nicht mit einem Smartphone oder Tablet verbunden werden oder die Daten können nicht korrekt übertragen werden.	Befolgen Sie die Anweisungen in der App OMRON connect. Wenn das Err-Symbol nach Befolgen der App- Anweisungen weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Einzelhändler oder Vertreter.	2. Legen Sie den Luftschlauch vorsichtig gefaltet in die Manschette. Hinweis Biegen oder knicken Sie den Luftschlauch nicht übermäßig. Legen Sie Ihr Messgerät und die) >,,
P blinkt.	Das Messgerät wartet auf die Kopplung mit dem Smartphone oder Tablet.	Informationen zur Kopplung Ihres Messgerätes mit Ihrem Smartphone oder Tablet finden Sie im Unterabschnitt 4.1. Sie können auch die Taste [START/STOP] drücken, um die Kopplung abzubrechen und Ihr Messgerät auszuschalten.	Beachten Sie weiterhin Folgendes zur Lagerung des Messgerätes ur Komponenten: • Das Messgerät und die Komponenten dürfen nicht in nassem Zustand gelagert werden. • Orte, die extremen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, direktem	and de
blinkt.	Das Messgerät ist bereit für die Übertragung Ihrer Messwerte auf das Smartphone oder Tablet.	OMRON connect, um Ihre Messwerte zu	Sonnenlicht, Staub oder ätzenden Dämpfen, wie etwa Bleichmit ausgesetzt sind, sind als Aufbewahrungsorte nicht geeignet. Orte, die Erschütterungen oder Stößen ausgesetzt sind, sind als Aufbewahrungsorte nicht geeignet.	
blinkt.	Es befinden sich mehr als 48 Messwerte zur Übertragung in Ihrem Speicher.	Übertragen Sie Ihre Messwerte in die App OMRON connect, um sie dort zu speichern.	 8.3 Reinigung Keine Scheuermittel oder flüchtigen Reinigungsmittel verwenden. Reinigen Sie das Messgerät und die Manschette mit einem weiche trockenen Tuch oder einem weichen, mit mildem (neutralem) Reinigungsmittel befeuchteten Tuch und wischen Sie anschließen einem trockenen Tuch nach. 	
erscheint.	wurden nicht eingestellt. Es befinden sich 60 Messwerte zur Übertragung in Ihrem	Anschließend wird das Fehlersymbol nicht mehr angezeigt.	 Messgerät und Manschette oder andere Komponenten dürfen nich Wasser abgewaschen oder in Wasser getaucht werden. Zum Reinigen des Messgerätes und der Manschette kein Benzin, Verdünner oder ähnliche Lösungsmittel verwenden. 	ıt mit
blinkt.	Speicher. Der Ladestand der Batterien ist niedrig.	Es wird empfohlen, alle 4 Batterien gleichzeitig durch neue zu ersetzen. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt 2.1.	 8.4 Kalibrierung und Wartung Die Genauigkeit dieses Blutdruckmessgerätes wurde sorgfältig gel und im Hinblick auf eine lange nutzbare Lebensdauer entwickelt. Es wird im Allgemeinen empfohlen, bei dem Messgerät alle zwei J eine Messtechnische Kontrolle durchführen zu lassen, um die korr Funktion und die Genauigkeit des Gerätes sicherzustellen. Wende sich an Ihren autorisierten OMRON-Fachhändler oder OMRON-Kundendienst, dessen Adresse auf der Verpackung oder den beigelegten Broschüren angegeben ist. 	lahre rekte
wird angezeigt oder das	Die Detterier eind leer	Ersetzen Sie umgehend	9. Optionales medizinisches Zubehör	
Messgerät schaltet sich während einer Messung unerwartet aus.	Die Batterien sind leer.	alle 4 Batterien durch neue. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt 2.1.	Manschette Netzteil Armumfang 22 – 42 cm	
	Die Batterien sind leer.			
Auf dem Display des Messgerätes wird nichts angezeigt.	Die Batteriepole sind nicht richtig ausgerichtet.	Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Weitere Informationen finden Sie im Unterabschnitt 2.1.	HEM-FL31 HHP-CM01	
Die Messwerte erscheinen zu hoch oder zu niedrig.	Der Blutdruck schwankt s einschließlich Stress, Tag Manschette können den E Lesen Sie die Unterabsch Abschnitt 3 erneut.	eszeit und Lage der Blutdruck beeinflussen.	Hinweis Entsorgen Sie den Luftschlauchstecker nicht. Der Luftschlauchstecker wird für die optionale Manschette verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter	cker
Sonstige Kommunikations- probleme	Befolgen Sie die auf dem Smartphone oder Tablet angezeigten Anweisungen oder rufen Sie die Hilfesektion in der App OMRON connect auf. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Einzelhändler oder Vertreter. Drücken Sie die Taste [START/STOP], um das Messgerät auszuschalten. Drücken Sie die Taste		Verwendung des Netzteils (optionales Zubehör) Hinweis • Verwenden Sie das Messgerät nicht an einem Ort, an dem Sie das Netzteil nur schwer anschließen und trennen können. • Wir empfehlen, die Batterien immer in Ihrem Messgerät zu belasse auch wenn Sie das Netzteil verwenden. Wenn nur das Netzteil ohr	en,

Messgerät auszuschalten. Drücken Sie die Taste

dann erneut, um eine Messung durchzuführen.

Wenn das Problem weiterhin auftritt, entnehmen

Setzen Sie anschließend die Batterien wieder ein.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie

sich an Ihren OMRON-Einzelhändler oder

Sonstige Probleme | Sie alle Batterien und warten Sie 30 Sekunden.

 Verwenden Sie NUR Netzteile, Manschetten, Batterien und andere Zubehörteile, die speziell für dieses Gerät bestimmt sind. Die /erwendung nicht zugelassener Netzteile, Manschetten und Batterien kann das Messgerät beschädigen und/oder zu Gefahren im Zusammenhang mit dem Messgerät führen.

Elektronische Blutdruckmessgeräte

10. Technische Daten

Produktkategorie

i roduktkategorie	Liektronische Diuturuckmessgerate	
Produktbeschreibung	Automatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät	
Modell (Artikelnummer)	M400 Intelli IT (HEM-7155T-D)	
Display	Digitales LCD-Display	
Manschetten-	0 bis 299 mmHg	
druckbereich		
Messbereich für	SYS: 60 bis 260 mmHg	
Blutdruckmessung	DIA: 40 bis 215 mmHg	
Messbereich für Puls	40 bis 180 Schläge/Min.	
Genauigkeit	Druck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 % des angezeigten Wertes	
Aufpumpen	Automatisch durch die elektrische Pumpe	
Luftablass	Automatisches Luftablassventil	
Messmethode	Oszillometrische Methode	
Übertragungsmethode	Bluetooth® Low Energy	
Drahtlose Kommunikation	Frequenzbereich: 2,4 GHz (2.400 – 2.483,5 MHz) Modulation: GFSK Effektive Strahlungsleistung: < 20 dBm	
Betriebsart	Dauerbetrieb	
	Messgerät: IP20	
IP-Klassifizierung	Optionales Netzteil: IP21	
Nenngrößen	6 VDC 4,0 W	
Stromquelle	4 AA-Batterien 1,5 V oder optionales Netzteil (Eingangsleistung 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 0,12 – 0,065 A)	
Batterielebensdauer	Ca. 1.000 Messungen (mit neuen Alkalibatterien)	
Nutzungsdauer (Betriebszeit)	Messgerät: 5 Jahre Manschette: 5 Jahre Optionales Netzteil: 5 Jahre	
Betriebsbedingungen	+10 °C bis +40 °C / 15 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) / 800 bis 1.060 hPa	
Lagerungs-/ Transportbedingungen	-20 °C bis +60 °C / 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)	
Gewicht	Messgerät: ca. 340 g (ohne Batterien) Manschette: ca. 163 g	
Abmessungen	Messgerät: ca. 105 mm (B) × 85 mm (H) × 152 mm (L) Manschette: ca. 145 mm × 532 mm (Luftschlauch: 750 mm)	
Manschettenumfang für dieses Messgerät	220 bis 420 mm	
Speicher	Maximal 60 Messwerte pro Benutzer	
Inhalt	Blutdruckmessgerät, Armmanschette (HEM-FL31), 4 Batterien vom Typ AA, Aufbewahrungstasche, Gebrauchsanweisung, Einrichtungsanleitung, Garantiekarte, Blutdruckpass	
Schutz vor Stromschlägen	ME-Gerät mit interner Versorgung (bei reinem Batteriebetrieb) Gerät der Klasse II ME (optionales Netzteil)	
Anwendungsteil	Typ BF (Manschette)	

• Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.

verursachen können.

- Dieses Messgerät entspricht den Anforderungen der Norm ISO 81060-2:2013. In der klinischen Validierungsstudie wurde K5 zur Messung des diastolischen Blutdrucks bei 85 Probanden verwendet. •Dieses Gerät wurde für den Einsatz bei schwangeren und Präeklampsie-Patientinnen gemäß dem Modifizierten Protokoll der Europäischen
- Gesellschaft für Hypertonie* validiert. • Dieses Gerät wurde für den Einsatz bei Diabetikern (Typ II) validiert**. •Die IP-Klassifizierung gibt den Schutzgrad von Gehäusen gemäß IEC 60529 an. Dieses Messgerät und das optionale Netzteil sind gegenüber festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 12,5 mm etwa einem Finger – geschützt. Das optionale Netzteil ist gegen vertikal fallende Wassertropfen geschützt, die bei Normalbetrieb Probleme
- * Topouchian J et al. Vascular Health and Risk Management
- ** Chahine M.N. et al. Medical Devices: Evidence and Research 2018:11 11–20

Hinweise auf Störungen der drahtlosen Kommunikation Dieses Produkt arbeitet im lizenzfreien ISM-Band bei 2,4 GHz. Wird dieses Produkt in der Nähe anderer drahtloser Geräte wie Mikrowellengeräte und WLAN-Geräte verwendet, die das gleiche Frequenzband wie dieses Produkt verwenden, können Störungen Beenden Sie bei auftretenden Störungen den Betrieb der anderen Geräte oder verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe anderer drahtloser

11. Zeichenerklärung und Herstellererklärung

elektromechanische Blutdruckmessgeräte.

 Dieses Blutdruckmessgerät wurde gemäß der europäischen Norm EN1060 entwickelt. Nichtinvasive Blutdruckmessgeräte Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Teil 3: Ergänzende Anforderungen für OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Funkgerät vom Typ HEM-7155T-D den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU

Altgeräte)

 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.omron-healthcare.com Dieses OMRON-Produkt wurde unter Einhaltung des strengen Qualitätssystems von OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan, hergestellt. Das Herzstück für OMRON-Blutdruckmessgeräte, der Drucksensor, wird in Japan hergestellt. Bitte melden Sie dem Hersteller und der zuständigen Behörde des

Mitgliedstaates, in dem Sie ansässig sind, alle schweren Vorfälle, die sich im Zusammenhang mit diesem Gerät ereignet haben.

Beschreibung der Anzeigesymbole		
Anwendungsteil – Typ BF Schutz vor Stromschlägen (Ableitstrom)		
Gerät der Klasse II. Schutz vor Stromschlägen		
Grad des Eindringschutzes gemäß IEC 60529		
CE-Kennzeichnung		
Seriennummer		
LOT-Nummer		
Medizinprodukt		
Temperaturbegrenzung		
Luftfeuchtigkeitsbegrenzung		
Luftdruckbegrenzung		
Anzeige der Steckerpolarität		
Nur für die Nutzung in Innenbereichen		
Markenrechtlich geschützte Technologie von OMRON zur Blutdruckmessung		
Kennzeichnung der mit dem Gerät kompatible Manschetten		
Arterienmarkierung		
Qualitätskontrollzeichen des Herstellers		
Enthält kein Naturlatex		
Armumfang		
Der Benutzer muss diese Gebrauchsanweisun lesen.		
Damit die Sicherheit gewährleistet ist, muss de Benutzer diese Gebrauchsanweisung sorgfältibefolgen.		
Gleichstrom		
Wechselstrom		
Als Hinweis auf allgemein erhöhte, potenziell gefährliche Stufen nicht ionisierender Strahlung oder als Hinweis auf Geräte oder Systeme zur Beispiel im medizinisch-elektrischen Bereich, etwa HF-Übertragungsgeräte, bzw. auf solche die elektromagnetische HF-Strahlung zur Diagnose oder Behandlung verwenden.		
Herstellungsdatum		
Symbol "Grüner Punkt"		

zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Weitere Informationen zur Konformität mit dieser EMV-Norm sind unter www.omron-healthcare.com dokumentiert. Beachten Sie die EMV-Informationen zu HEM-7155T-D auf unserer Webseite.

Das Messgerät HEM-7155T-D entspricht der Norm EN60601-1-2:2015

Korrekte Entsorgung dieses Produktes (Elektro- und Elektronik-

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Produkt bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

> Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. erfolgt in Lizenz. Andere Marken und Markennamen gehören ihren jeweiligen

App Store und das App Store-Logo sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Niederlassung	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT
Produktionsstätte	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Importeur in der EU	
EC REP	Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIEDERLANDE www.omron-healthcare.com
EU-Repräsentant	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
•••	53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
Hersteller	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

www.omron-healthcare.com

Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, DEUTSCHLAND

Hergestellt in Vietnam